


Odběr stěru

Podrobný návod


1 Nasadte si rukavice nebo si očistěte ruce pomocí ruční dezinfekce. Je to proto, abyste nekontaminoval/a testovací sadu

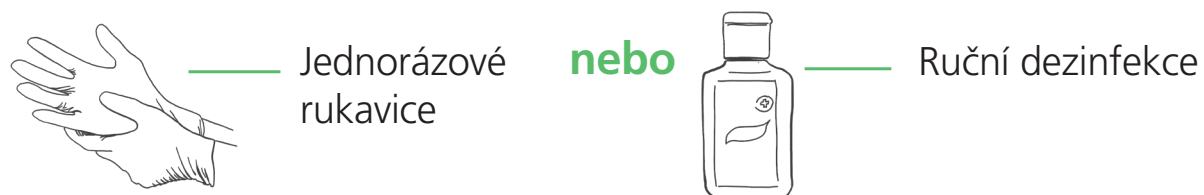

Potřebujete pomoc?

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo problémy s touto testovací sadou, obraťte se na zaměstnance.


2 Zkontrolujte obsah sady.

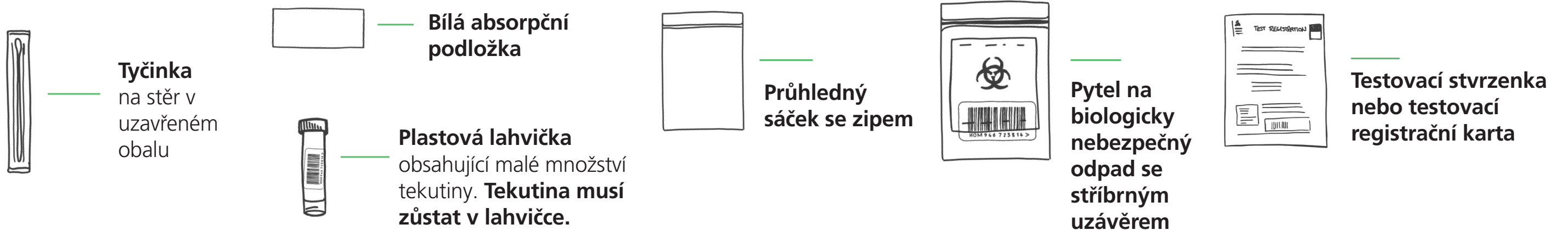


3 Jemně se vysmrkejte do kapesníku. Kapesník vyhodte doma do koše. To je proto, abyste se zbavil/a přebytečného hlenu.



4 Podívejte se do úst a najděte mandle v zadní části hrdla. Můžete použít zrcátko v autě. **Stěr odeberte tam, kde jsou nebo by měly být mandle (pokud vám nebyly odstraněny).**

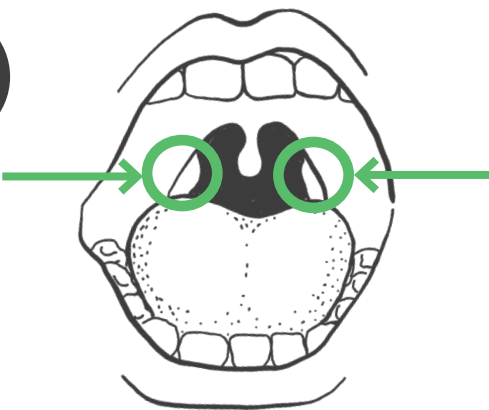

5 Otevřete obal a opatrně vytáhněte tyčinku. Tu použijete jak na krk, tak na nos.

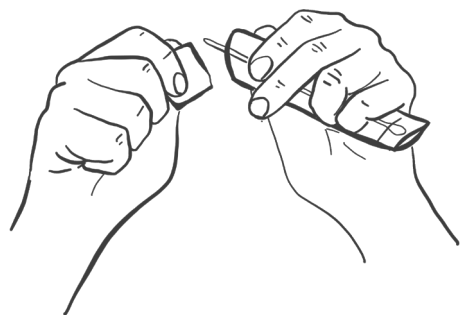

Důležité


Látkovým tamponkem se nedotýkejte jazyka, zubů, tváří, dásní ani jiných povrchů.

Pokud se tamponkem dotknete těchto částí, stěr bude nepoužitelný a budete muset požádat o novou tyčinku. Pokud k tomu dojde, požádejte zaměstnance o pomoc.

Použijte stejnou tyčinku na mandle i nos.


Může to být nepříjemné nebo vás u toho může natahovat, ale nemělo by to bolet.

6 **10 vteřin**

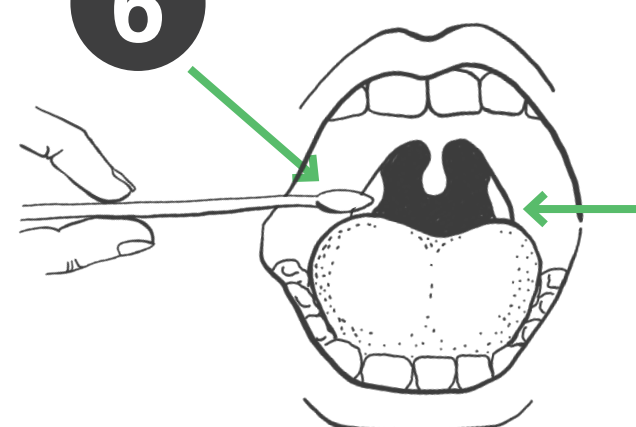

Vezměte tyčinku do ruky, otevřete ústa dokořán a otírejte textilní tamponěk tyčinky o obě mandle (nebo tam, kde by měly být) v zadní části hrdla po dobu **10 vteřin** (použijte zrcátko v autě). Opatrně vyjměte tyčinku ze zadní části hrdla.

7 **10-15 vteřin**

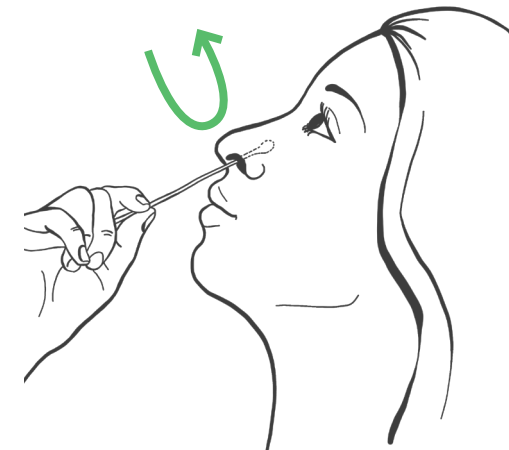

Vložte stejný konec stejné tyčinky opatrně do jedné nosní dírky, dokud neucítíte mírný odpor (asi 2,5 cm do nosu). Otáčejte tyčinkou po dobu **10-15 vteřin** a pomalu ji vyjměte. Stěr stačí odebrat z jedné nosní dírky. Pokud máte piercing, použijte druhou nosní dírku.

Důležité

Stěr může být nepříjemný. Nezasunujte tyčinku hlouběji, pokud cítíte silný odpor nebo bolest.

Pokud je na vzorku krev nebo zvrátky, přivolejte zaměstnance.




Zabalte sadu

Podrobný návod

8



Při vkládání do lahvičky se ujistěte, že látkový tamponěk směřuje dolů. Druhý konec tyčinky odlomte, aby se vešel do lahvičky bez ohýbání. Víčko pevně našroubujte na lahvičku.

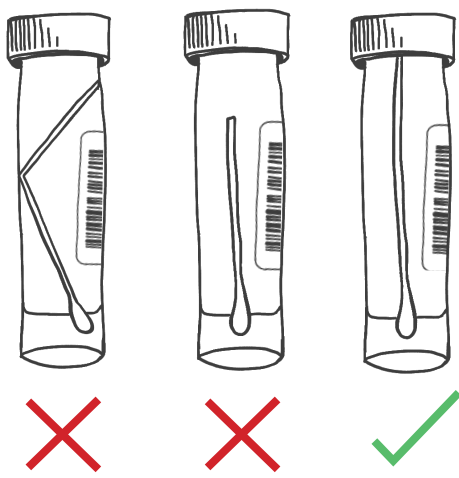


Důležité

Víčko bezpečně našroubujte, aby tekutina nevytekla. Při nasazování víčka možná budete muset vyvinout určitý tlak.

9

a. Nejprve umístěte absorpční podložku do menšího průhledného sáčku se zipem.

b. Poté umístěte lahvičku do stejného sáčku vedle absorpční podložky.

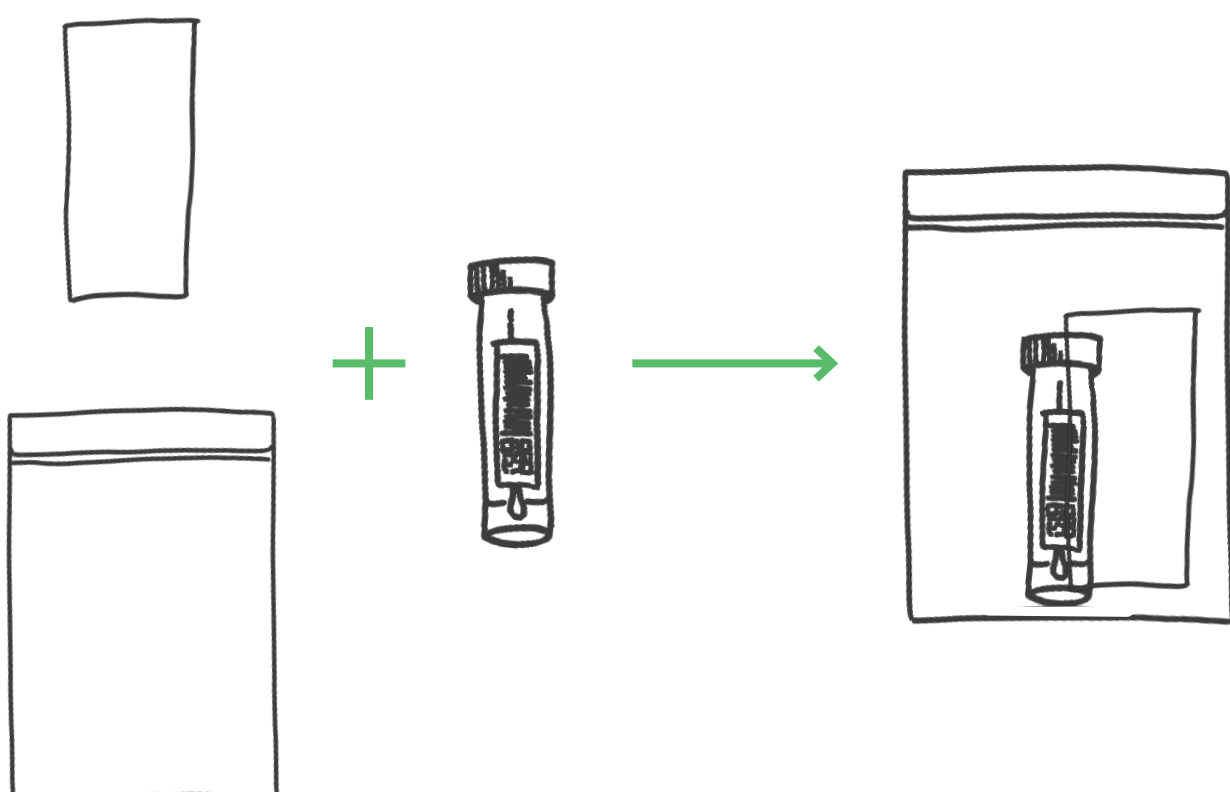


10


Vložte sáček se zipem do většího pytle na biologicky nebezpečný odpad.

Větší pytel na biologicky nebezpečný odpad neuzavírejte.

Před uzavřením musí sadu zkontrolovat člen personálu.

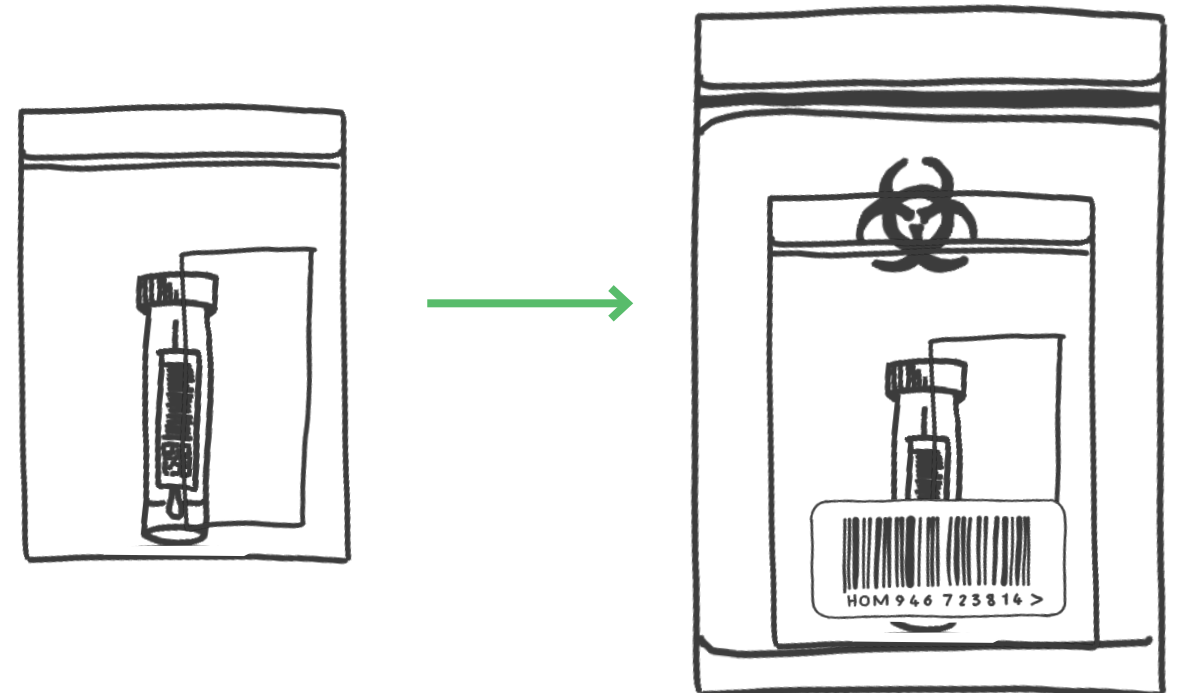


11

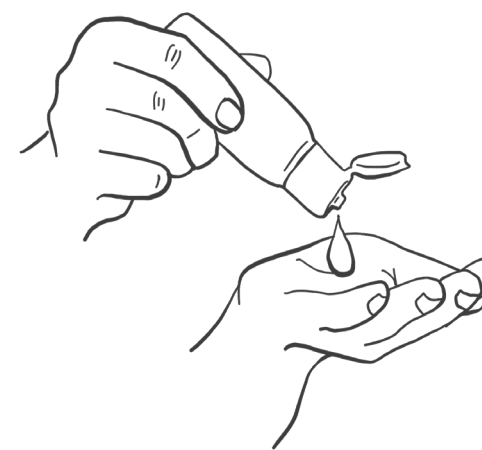

Pokud jste použil/a rukavice, můžete si je nyní sundat a hodit je do nádoby na klinický odpad. V opačném případě použijte ruční dezinfekci.

12

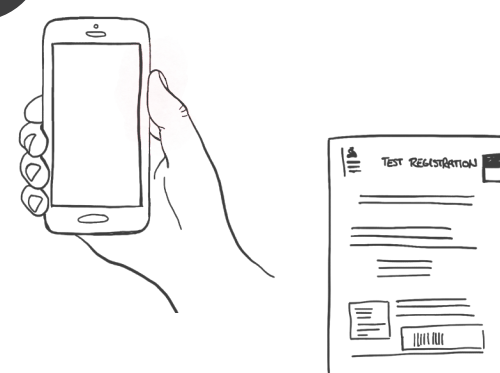

Zaregistrujte vaši testovací sadu.

Pokud jste obdržel/a **testovací registrační kartu**, postupujte podle pokynů na kartě.

Pokud jste obdržel/a **testovací stvrzenku**, obraťte se na asistenta.

13

Zakryjte si obličej.

Než přivoláte člena personálu, zakryjte si obličej. Zkontroluje vaši testovací sadu a řekne vám, co dělat dál.

Nyní můžete testovací sadu se vzorkem odevzdat. Přivolejte zaměstnance.